

Kurzbeschreibung Chromalume Kopflicht

Diese Information ersetzt nicht das Lesen der Gebrauchsanweisung

Nach Einschalten der Lichtquelle ist diese sofort aktiv.

Gerät am Taster (1) einschalten. Das Gerät arbeitet mit der zuletzt eingestellten Intensität. Diese lässt sich durch den Regler (2) einstellen.

Das BFW Lichtleitkabel (blau) wird am Multiport in die grün markierte Buchse (BFW) eingesteckt (3). Der Port muss sich in 3-Uhr-Position befinden. Das Kabel wird im Multiport in einem einen Sprengring gehalten, ist aber bei Bewegungen flexibel.

Im Betrieb muss die Lichtquelle zur Belüftung frei stehen.

Die Stirnlampe wird am Kopfring getragen. Das blaue Lichtleitkabel ist 3m lang und leuchtet im Betrieb. **Achtung: den Lichtleiter nicht abknicken oder einklemmen!**

Die Neigung der Stirnlampe kann über ein Doppelgelenk (4) eingestellt werden. Das Leuchtfeld kann über eine Irisblende (5) eingestellt werden.

Der Kopfring wird durch zwei Stellknöpfe (6) eingestellt. Beide Stellknöpfe des Kopfringes soweit öffnen, dass der Kopfring locker auf dem Kopf des Nutzers aufliegt. Den oberen Kopf soweit anziehen, dass das vordere Teil des Kopfringes sich höhenmässig an der Stirn befindet. Den Sitz dann durch Anziehen des hinteren Stellknopfes fixieren.

Positionierung der Stirnlampe vor dem Waschvorgang: Iris auf Minimum einstellen und den Lichtspot in Operationshaltung leicht oberhalb der Hände positionieren. Dann Iris wieder aufmachen, Kabel ziehen und Gerät ausschalten.

Kabel am Kittel oder Kasak des Operators mit der Kittelklemme (7) fixieren.

