


Kurz-Gebrauchsanweisung Dover / Bristol Kopflicht

ERSETZT NICHT DAS LESEN DER GEBRAUCHSANWEISUNG!

Bedienungselemente des Kopflichtes

- 1 Kopfring mit Einstellknöpfen für Weite und Höhe
- 2 Hinterkopf-Polster
- 3 Leuchtmodul (Dover)
- 4 Leuchtmodul mit Iris (Bristol)
- 5 Ladeschale

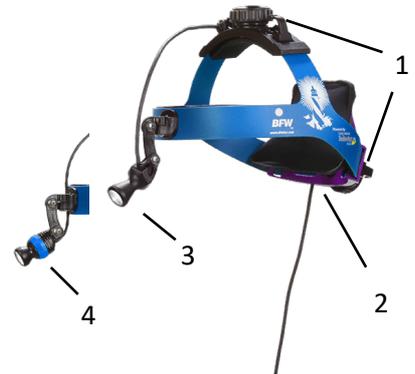

Laden der Akkus

bei Einsatz der Akkus in die Ladestation und in das Steuerteil auf die Position der Kontakte achten.

Der Ladung des Akkus wird nach Drücken des Knopfes (6) auf einem LED-Bar angezeigt (4 LEDs)



Anschluß des Leuchtmodules an das Steuerteil

Zum Verbinden des Stecker auf dem Sockel des Steuerteiles einrasten. Rändelschraube festziehen. Das Steuerteil lässt sich danach gegen das Kabel verdrehen/ entwirren.



Bedienung des Steuerteils:

- Auf beiden Seiten des Steuerteiles (Pfeile) befinden sich Taster
- 1 Taster drücken : Kopflicht schaltet ein und ist auf höchster Stufe
- 1 Taster erneut drücken: Intensitätsstufen (5) werden durchgeschaltet
- 2 Taster (anhaltend) drücken (> 2 sec): Kopflicht schaltet ab.

Akku von hinten aus der Halterung drücken, wenn dieser wieder aufgeladen werden soll. Nicht an der Lasche herausziehen!



Vollgeladen ca. 10 h Kapazität bei voller Leuchtstärke.

Handhabung des Akkus: Ruhephase:

- NICHT nach längerem Betrieb direkt den Akku aufladen
- NICHT nach längerem Aufladen direkt in den Betrieb gehen (voll geladener Akku ist ok)

Wartezeit von ca. 10 Minuten einhalten für optimale Lebensdauer der Akkus!